


## IMPORTANT :

Pour stylo injecteur d'insuline (HumaPen Luxura/HD, HumaPen Savvio, Humalog KwikPen, Abasaglar):

- Il faut changer d'aiguille à chaque injection (car une aiguille qui est utilisée plusieurs fois peut finir par se boucher) ;
- Il ne faut jamais laisser l'aiguille sur le stylo entre deux injections ;
- Il ne faut jamais conserver le stylo au frigo une fois entamé, et surtout pas avec une aiguille attachée ;
- Il faut purger le stylo comme illustré ci-dessous :

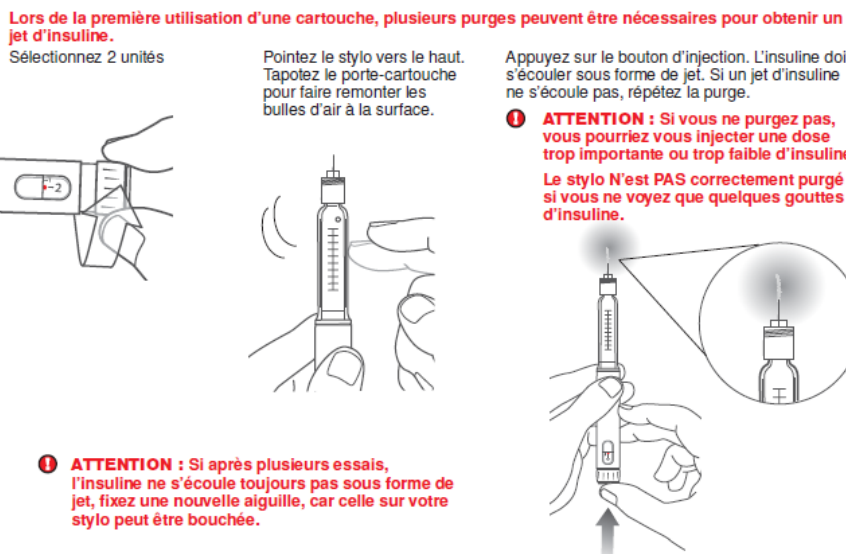

Le respect de ces 4 règles permet de résoudre la majorité des problèmes. Si malgré le respect de ces règles, vous n'avez pas pu résoudre le problème, veuillez nous contacter : 02 548 84 84.