


BELANGRIJK :

Voor een insuline pen (HumaPen Luxura/HD, HumaPen Savvio, Humalog KwikPen, Abasaglar):

- De naald moet vervangen worden bij elke injectie (want een naald die meerdere keren gebruikt wordt, kan verstopen) ;
- De naald mag nooit bevestigd blijven op de pen tussen twee injecties ;
- De pen mag niet bewaard worden in de koelkast eens in gebruik, en zeker niet met een naald erop bevestigd ;
- De pen moet ontlucht worden zoals hieronder afgebeeld:

Wanneer er een nieuwe insulinepatroon gebruikt wordt, dan kan het nodig zijn dat de pen een aantal malen moet worden ontlucht om een stroompje insuline te krijgen.

Stel 2 eenheden in.

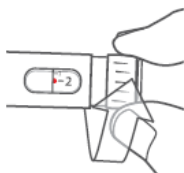


Houdt de Pen omhoog gericht. Tik tegen de patroonhouder zodat de lucht zich bovenin verzamelt.



Druk op de injectieknop. Kijk of de insuline gelijkmatig uit de naald stroomt. Ontlucht de Pen nog een keer wanneer er geen stroom insuline verschijnt.

⚠ LET OP: Als u niet ontlucht dan kunt u te veel of te weinig insuline krijgen.

De Pen is NIET goed ontlucht als u alleen een paar druppels insuline ziet verschijnen.

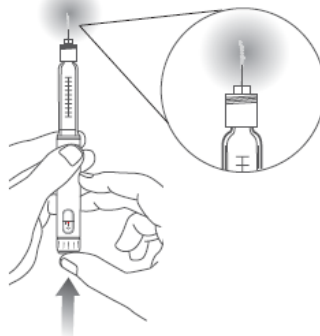

⚠ LET OP: Als er na een aantal malen ontlichten de insuline nog steeds niet gelijkmatig uit de naald stroomt, dan kan uw naaldje mogelijk verstopt zijn. Bevestig dan een nieuw naaldje.

Het naleven van deze 4 regels maakt het mogelijk om de meeste problemen op te lossen. Indien u het probleem niet hebt kunnen oplossen na het naleven van deze regels, gelieve ons te contacteren : 02 548 84 84.